

Gratulálunk az UDDERLY EZ FEJŐEGYSÉG megvásárlásához. Kiváló teljesítményt és megbízhatóságot várhat el a berendezéstől tej ill kolosztrum fejéséhez, hogy táplálja az újszülötteket tejet vagy kolosztrumot gyűjtsön egy újszülött anyjától azonnali használatra tejet vagy kolosztrumot gyűjtsön egy újszülött anyjától tej/kolosztrum bankban történő tároláshoz.

A fentiek minimális erőfeszítéssel és nagyfokú biztonsággal elvégezhetőek. Kérjük kövesse az alábbi lépéseket a berendezés összeszerelésével és használatával kapcsolatban, valamint tekintse meg a berendezéshez biztosított videót.

Összeszerelés:

- 1, Mielőtt megkezdene a fejést nézze meg a mellékelt DVD-t
- 2, Csatlakoztassa a palack csatlakozó kúpos végét a pumpa csatlakozó lyukához; a két rész össze fog kapcsolódni.
- 3, Csavarja a gumi O-gyűrűvel ellátott áttetsző műanyag palackot a hengerre; ez a kapcsolódás szoros legyen, így a levegő szívargása elkerülhető.
Figyelmeztetés: ne csavarja a gyűjtőpalackot a gyűjtőcsőre úgy, hogy a cső a pumpacsatlakozóhoz van rögzítve. Ha a palackot úgy próbálja meg megszorítani, hogy a szívócső a pumpára van csiptetve nagy nyomás érheti az alkatrészeket, amely a csipesz törését okozhatja. Csavarozza a gyűjtőpalackokat és gyűjtőcsöveket először össze, ezután csatlakoztassa őket a pumpához.
- 4, Fogja meg a pumpát és csúsztassa a palackcsatlakozó csipeszt a gyűjtőcilindereken lévő vezetőgerinc közé, a két rész össze fog csatlakozni.
- 5, Óvintézkedésként finoman nyomja össze a cilindert és a pumpát, így biztonsággal ül egymáson a két alkatrész.
- 6, Helyezze az szívórész száját a keze éléhez és pumpálja. Így meggyőződhet róla, hogy a megfelelő vákuum létrejön. Amennyiben nem jön létre vákuum ismétlje meg a fenti 2 és 4-es lépést.
Az Udderly EZ tej és kolosztrum szívó cilinderek két méretben elérhetőek. egy kisebb, amely kis vagy fiatal kancákhoz, lámákhoz, birkákhoz, kecskékhöz, tehénekhez használható, valamint egy nagyobb az idősebb, vagy nagyobb tenyészkancákhoz, tehénekhez használható.
2 méretű szilikon beillesztés elérhető a birkák és kecskéké számára, és két méretű fekete gumi beillesztés a tehének számára. A tehenes beillesztés mindkét kemény műanyag szívócsőbe beilleszthető. A nagy és a kis fehér szilikon beillesztések csak a második kemény műanyag szívócilinderebe illik bele. Az elsőbe nem. Minden szetthez biztosítjuk az első csövet, mert előfordulhat, hogy beillesztés nélkül szeretné használni. Minden cső az elején megjelölésre kerül #1 vagy #2 jelzéssel. Megjegyzés: amikor a nagy szilikon kehelygumit (beillesztést) a második csőbe illeszti észreveheti, hogy a teteje egy kicsit a szívócső felett helyezkedik el. Nyomja le és így rá fog illeni a szívócső tetejére, biztosítva a légmentes lezárást.
Lehetőség van a legtöbb állatnál a beillesztés nélkül is megfejteni, de nélkülük a tej/kolosztrum nem kerül a pumpába.

A berendezés tisztítása

Minden használat után azonnal tisztítsa meg a fejőgépet. A fejőgép pumparésze könnyedén le és feltehető, így a fejőgép részei könnyen tisztíthatók. Minden használat után, a gyűjtő szívó cilindert és a műanyag gyűjtő palackot áztassa meleg vízbe. A vízhez adhat fertőtlenítő vagy tisztítószert vagy kis mennyiségű klóros tisztítószert vagy fehérítőt (az arány ne haladja meg az 1:10-hez arányt) Tisztítsa meg és öblítse át alaposan a részeket, majd hagyja megszáradni. A fejőgép külső részeit Udderly EZWipes törülközővel tisztíthatja. Megjegyzés: soha ne forralja a műanyag gyűjtőpalackokat. A forralás tönkretelheti a palackokat. Megfelelő fertőtlenítés mellett a forralás nem szükséges. Soha ne tegye a palackokat mosogatógépbe. Tisztítás után ne felejtse el visszatenni a fekete O gyűrűt a palackra.

A fejőgép az O gyűrű nélkül nem működik.

A pumpa tisztítása

Amennyiben kolosztrum vagy tej kerül a pumpa belsejébe azonnal tisztítsa meg. Merítse a teljes pumpát meleg, szappanos vízbe vagy tisztítószeres vízbe (pH 7-8 között), adjon 4-6 evőkanál szódadibikarbónát és pumpálja keresztül a pumpán. Ismétlje meg a lépéseket meleg tiszta vízzel is, pumpálja át a pumpát, távolítsa el minden nedvességet, rázza ki és szívjon a pumpán keresztül levegőt, így a belseje is kiszáradhat. Majd törölje le és hagyja száradni. Ne hagyja tejjel vagy kolosztrummal érintkezett pumpát éjszakára, vagy hosszabb időre tisztítás nélkül. A kolosztrum nagyon sűrű és ragadós, és tönkretelheti a pumpát, ha megszárad rajta.

Fagyasztott kolosztrum felengedése

Soha ne használjon mikrohullámú sütőt a fagyasztott kolosztrum felmelegítéséhez, mivel az elpusztítja az antitesteket. Helyezze a palackot egy meleg vizes fürdőbe és hagyja, hogy lassan felengedjen.

A tej vagy koloszturm kinyerés folyamata

1. Mindig tisztítsa meg a tőgy területét Udderly EZWipes törülközővel, amelyet a szettben talál, így eltávolítja a felgyülemlett szennyeződést és baktériumot.
2. Finoman vegye le a viaszos tömítést a tőgyről, hogy az ne essen bele a palackba.
3. Kézzel nyomja meg az összes emlőt legalább kétszer, így jó tejfolyást indíthat el. Nedvesítse meg vagy használjon balzsamot az emlőkön a vákuum biztosításához.
4. Helyezze a cilindert közvetlenül az emlő fölé és finoman emelje a pumpa egységet a tőgyhez.
5. 2-3x préselje össze a kart, ez megindítja a vákuumot, és lezárja az egységet az állat tőgyéhez. Szabad kézzel fogja a palackot és döntse kifelé vagy elfele a fogótól a lezárásig.
6. Amikor a tej folyni kezd hagyja abba a pumpálást. Amikor az áramlás lelassul vagy megáll újra kezdje el a pumpálást. Ezt 3-4 alkalommal lehet, hogy el kell végeznie, lásd videó
7. A vákuum feloldásához nyomja hátrafelé a palackot, így elengedi a vákuumzár a tőgyet. Ne húzza le a pumpát a tőgyről.
8. Az első fejés általában 8-12 ounce kolosztrumot eredményez, de ez fajtánként és tenyészetenként eltérhet
9. Amennyiben az anyaállat nem ad azonnal tejet, szükség lehet a tőgy finom masszírozására a tej elindításához. Nyomja a teljes pumpát és a palackot a tőgybe és hagyja, hogy a súly újra lehúzza, ügyelve arra, hogy a vákuum ne szűnjön meg.
10. Ne töltse túl a gyűjtőpalackot, csak a jelzett vonalig legyen benne tej. Ne döntse a pumpát hátrafele. Így a tej vagy a kolosztrum befolyhat a levegőbevezető lyukba és károsíthatja a pumpában található válaszfalat.
11. Öntse a begyűjtött tejet vagy kolosztrumot egy 10-16 oz úrtartalmú műanyag palackba, csatlakoztassa a cumit, és etesse meg az állatot. Vagy öntse a begyűjtött tejet vagy kolosztrumot egy gyűjtőpalackba, tegye rá a tömítéssel ellátott fehér fedőt, és fagyassza le a tejet.